


ForgetMeNot®

wiederverwendbares Finger-Tourniquet

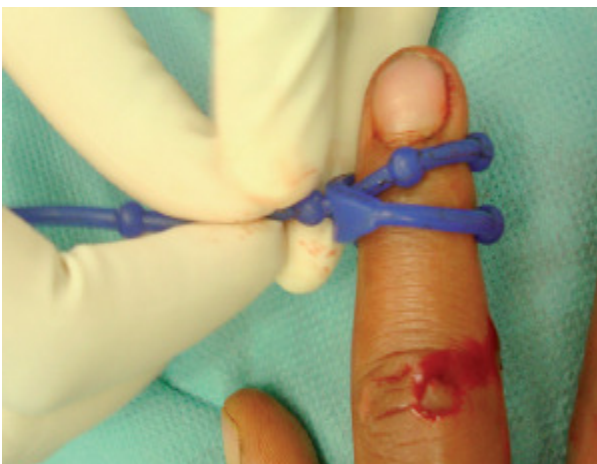

ForgetMeNot® wurde speziell als Finger-Tourniquet entwickelt und bietet folgende Vorteile:

- Wiederverwendbarkeit
- Universalgröße
- völlige Blutleere
- durch die auffälligen Farben (blau und gelb) kann es nach der OP nicht vergessen werden
- leicht zu entfernen ohne zusätzliches Trauma für Wunde und Haut
- umweltfreundlich, da wiederverwendbar

Bestellnummern:

FMN-B ForgetMeNot®, blau (1 VE à 10 Stück)
FMN-Y ForgetMeNot®, gelb (1 VE à 10 Stück)




Fallbeispiel von Dr. Sybille Facca, Universitätsklinik Straßburg, Frankreich

Ein Produkt der Fa. AREX®, Frankreich, Vertrieb in Deutschland durch:

A M T Aromando Medizintechnik GmbH, D-40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 - 0 Fax 0211 / 862 999 - 29 eMail: info@amt-med.de

ForgetMeNot®

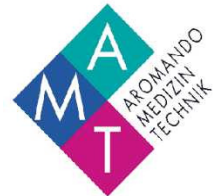

Gebrauchsanweisung (Kat.-Nr. FMN-B / FMN-Y)

Bitte folgen Sie nachstehenden Empfehlungen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. - Das ForgetMeNot® Finger-Tourniquet wird unter örtlicher (LA) oder locoregionaler (LRA) Anästhesie angewandt.



1.) Vor dem Platzieren wird das Tourniquet wie folgt präpariert: Man formt ein oder zwei Schlaufen, indem man einen oder besser beide Perlenstränge durch die Öffnungen im Mittelstück zieht.



2.) Dann wird das Tourniquet auf der Fingerspitze aufgesetzt und durch Ziehen an beiden Strängen festgezogen.



3.) Um den Zustand der Blutleere zu erreichen, wird nun das Tourniquet bis zum Ansatz des Fingers heruntergerollt.



4.) Der chirurgische Eingriff kann jetzt beginnen.



5.) (Operationsvorgang)



6.) Das Entfernen des ForgetMeNot® Tourniquets ist einfach: Am Mittelstück ziehen und so das Tourniquet lockern und entfernen. Es kann resterilisiert und danach wiederverwendet werden.

Ist vollständige Blutleere nicht erforderlich, genügt auch eine einzelne Schlaufe. Dazu wird der Arm für ein paar Minuten über Herzhöhe gehalten und ForgetMeNot® direkt am Ansatz des Fingers angebracht.

Ein Produkt der Fa. AREX®, Frankreich, Vertrieb in Deutschland durch:

A M T Aromando Medizintechnik GmbH, D-40213 Düsseldorf
Tel. 0211 / 862 999 - 0 Fax 0211 / 862 999 - 29 eMail: info@amt-med.de